

## INSTRUÇÃO DE USO

### SONDA MONOPOLAR EVO

#### Modelos:

- EMSF\_800** 1 unidade Sonda Monopolar Fina
- EMSR\_800** 1 unidade Sonda Monopolar Bola
- EMSC\_800** 1 unidade Sonda Monopolar Curva
- EMST\_800** 1 unidade Sonda Monopolar TOETVA
- EMSRC\_800** 1 unidade Sonda Monopolar Retã

#### Indicação de uso/ Finalidade:

Indicado para captação e estimulação de nervos periféricos como pregas vocais, nervo laríngeo recorrente e ramificações faciais (frontal, orbicular dos olhos, bucinador, marginal) em procedimentos intraoperatórios.

#### Condições para armazenamento e transporte:

- Armazenar em local fresco e seco, protegido da luz solar direta e de agentes corrosivos. A temperatura do local deve estar entre 5°C e 30°C. O produto pode ficar armazenado até a sua data de validade
- Não coloque sob a embalagem pesos ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos às características técnicas do produto e comprometer a integridade da embalagem;
- Transporte com cuidado e respeitando as normas estabelecidas para transporte de produtos esterilizados, pois o transporte inadequado pode comprometer a continuidade da integridade da embalagem e a qualidade do produto oferecido pelo fabricante;

#### Condições para operação:

- Deve ser utilizado apenas por profissionais qualificados, habilitados e treinados.
- Como o produto é fornecido estéril, sua embalagem deve ser aberta apenas no momento pretendido ao uso.
- Antes de sua abertura, verifique a integridade da embalagem, garantindo que a mesma não esteja com prometida. Caso a embalagem esteja danificada/violada, não utilize o produto.
- Durante o manuseio, evite ações que possam romper, rasgar, deformar a haste, transmitir sujeira e umidade para a embalagem.

#### Advertências/ Precauções:

- O manuseio deve ser realizado por profissionais qualificados, habilitados e treinados;
- A inserção e o manuseio adequados do produto é importante para o monitoramento seguro e preciso;
- O produto é fornecido estéril. Sua esterilidade não estará garantida se a embalagem estiver danificada ou aberta;
- Produto de uso único, não deve ser reutilizado;
- Proibido Reprocessar;
- A reutilização desse produto pode causar contaminação cruzada e infecções, além de anular a garantia do produto;
- Não reesterilize o dispositivo médico, pois a sua reesterilização pode resultar em seu mau funcionamento;
- Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada;
- Não utilize o produto se os componentes apresentarem danos (pontas do eletrodo de agulha subdermal e da sonda torcidas, por exemplo);
- O produto não deve ser utilizado se a data de validade presente no rótulo estiver expirada;
- A exposição prolongada ou repetida a estímulos elétricos pode provocar fadiga neuromuscular, o que resulta na falha da localização do nervo (o equipamento detecta respostas negativas falsas);
- A aplicação de agentes anestésicos pode influenciar nas respostas aos estímulos. Desse modo, deve-se consultar o anestesiológico quando houver suspeita de paralisia nervosa;
- A EVO Medicina não se responsabiliza pelos danos, infecções e lesões causadas pelo uso inadequado do dispositivo médico.

#### Contraindicações:

- Contraindicado para pacientes alérgicos ao PVC ou aço inoxidável.
- Proibido para pacientes que usam marcapassos cardíacos implantáveis

#### Efeitos Secundários:

Vermelhidão e inchaço da pele.

#### Segurança e Eficácia do Produto:

Produto totalmente seguro se utilizado por profissional habilitado e respeitando as especificações de uso descritas neste documento; O não cumprimento dessas instruções causa o uso incorreto do dispositivo, configurando mau uso e potencializando os riscos para o paciente. Em caso de dúvidas ou problemas, consulte sempre a EVO.

#### Descarte:

O descarte dos componentes deve ser realizado conforme o procedimento e normativa vigentes, assim como os requisitos presentes na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 222, de 28 de março de 2018.

#### Símbolos utilizados:



**Cuidado**



**Não reutilizar**



**Data de fabricação**



**Esterilizado por Óxido de Etileno**



**Lote**



**Data de validade**



**Fabricante**



**Não reesterilize**



**Não use se o pacote estiver danificado**



**Mantenha longe da luz solar**



**Conservar em local seco / Longe de umidade.**



**Risco Biológico**



**Limites de temperatura máxima e mínima de armazenamento.**

**Registro ANVISA: 81704069035**

**Fabricante e Detentor de Registro:** EVO Medicina Especializada Ltda – Rua Alegre, 470 conj 1101 – Santa Paula – São Caetano do Sul – SP – Brasil  
CEP 09550-250

**Contato:** +55 11 4226 5225